

CareBidets

Användar- och installations manual modell Jasmin Care

600-series

JHC611/612




Läs denna manual noggrant före användning och installation
2.59/20574



Top Hygien Nordic AB
www.vastiacare.se info@vastiacare.se
Växel: +46 31-94 35 26

Viktiga säkerhetsregler	5-6
Grundläggande instruktioner	7
Säkerhetsföreskrifter	8-9
Uppackning av din Jasmin Care	10
Beskrivning av Fjärrkontrollen	11
Så här används Jasmin Care	12
Multifunktionsknapp på Jasmin Care	13
Anslutning av extern fjärrkontroll	13
Inställning av automatiskt spol- och torkprogram	14
Inställning av klockan	15
Släckning av blå nattbelysning på sitsen	15
Var uppmärksam på följande	15
Rengöring	16
Underhåll	17
Innan du ringer efter service / Felsökning	18
Kassering av elektronisk och elektrisk utrustning	19
Tekniska specifikationer	20
Monteringsvägledning	21-23

Märkning

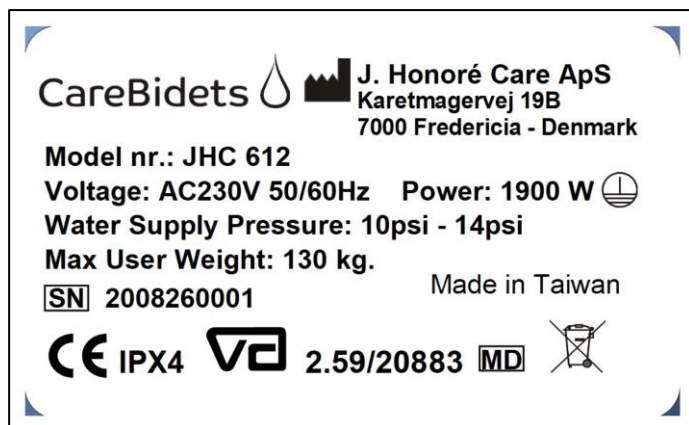

Etiketten är placerad på produktens baksida. Se ikonbeskrivningar på sid.4





Modell nr. _____

Serie nr. _____

Köp datum. _____

Installatörs namn/telefon. _____

Serienumret finns på produktens typskylt på baksidan. Skriv upp nämnda information och spara detta för framtida referens.









	This product complies with the directive MDR 2017/745 concerning Medical devices. The launch date for this product is specified in the CE declaration of conformity
 2.59/ 20883 2.59/20574	The product meets the requirements of EN 1717 (Protection against pollution of potable water installations and general requirements of devices to prevent pollution by backflow
Max 130 kg	DS/EN 12182:2012 Assistive Products for persons with disability – General Requirements and test methods.
	EN 60335-1:2012 +A11:2014 +A13:2017 EN 60335-2-84:2003 +A1:2008 Household and similar electrical appliances – Safety – Part 1: General requirements Part 2-84: Particular requirements for toilets
	EMC: EN 60601-1-2 Medical electric equipment - Part 1-2: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral standard: Electromagnetic disturbances – Requirements and tests Emission: CISPR 14-1:2015 + A1:2008 +A2:2011 EN 55014-1:2006 +A12009 +A2:2011 IEC 6100-3-2:2014 and IEC 61000-3-3:2013 +A1:2019 Immunity: IEC 61000-4-2:2008, IEC 61000-4-3:2010, IEC 61000-4-4:2012 IEC 61000-4-5:2014+A1:2017, IEC 61000-4-6:2013, IEC-4-8:2009, IEC 6100-4-11:2004 +A1:2017

Förväntad livslängd

Om produkten används som den är avsedd och i enlighet med säkerhetsföreskrifterna så är den förväntade livslängden 5 år från installationsdatum, dock längst efter två års lagringstid. Den effektiva livslängden kan dock variera beroende på användningsfrekvens och intensitet.

Garanti

Vi tillhandahåller en Tillverkargaranti för produkten i enlighet med Allmänna Affärsvillkor i respektive land. Garantikrav kan endast göras via den leverantör/återförsäljare från vilken produkten erhöles. Var vänlig kontakta din lokala återförsäljare.

Allmänna symboler som används i denna bruksanvisning, produkt och förpackning	
	Se bruksanvisning för mer info
	Tillverkare
	Visar på en medicinteknisk produkt som bör skyddas mot fukt
	Medicinteknisk produkt
	Serienummer. Exempel: 2008260001 År/månad för produktion: 20/08
	Varning
	För att identifiera alla terminaler som är avsedda för anslutning till en extern ledare för skydd mot elektrisk stöt vid ett fel eller anslutningen till en skyddande jordelektrod (jord)
	Separat insamling för avfall av elektrisk och elektronisk utrustning. Kasta inte batteriet i kommunalt avfall. Symbolen anger att separat insamling för batteri krävs.



Viktiga säkerhetsregler

Vid bruk av alla elektriska produkter, särskilt om barn närvarar skall de grundläggande säkerhetsreglerna alltid följas. Detta inkluderar följande:

Läs alla instruktioner före montering och användande.

FARA

För att minska risken för elektrisk stöt skall följande iakttagas:

1. Produkten får inte användas vid dusch och får inte översköljas av vatten
2. Sitt inte på din Jasmin Care med våta fötter eller om golvet är blött.
3. Om en strömförande produkt hamnar i vattnet ska strömmen brytas. Först när strömmen är bruten kan produkten tas upp ur vattnet. Skicka produkten till auktoriserad verkstad för reparation innan den tas i bruk.

VARNING

För att minska risk för elektrisk stöt, brännsår, eld eller annan skada på person skall följande beaktas:

1. Använd produkten enligt denna manual. Använd inte andra tillbehör än de som rekommenderas av tillverkaren.

2. Använd aldrig produkten om följande inträffat:

- Trasiga ledningar eller stickkontakt
- Produkten inte fungerar korrekt
- Den röda strömlampan blinkar
- Kabeln till sätesvärmern har blivit skadad

Ta bort strömförsörjningen och vattenanslutningen och lämna produkten för service/reparation hos auktoriserad verkstad.

3. Håll sladdar borta från värme.

4. Blockera aldrig lufthålen på produkten. Låt den aldrig stå på blöt yta. Håll produkten ren från hår, dammpartiklar och smuts.

5. Täpp aldrig till öppningar och slangar.

6. Använd inte produkten utomhus eller där spray eller syrgasflaskor används eller förvaras.

7. Anslut endast produkten till jordat uttag och jordfelsbrytare.

8. Använd ej "slipande" rengöringsmedel, syra eller alkaliskt rengöringsmedel.

9. Håll produkten borta från cigaretter, öppen låga och lättantändliga material.
10. Gör inga obehöriga ändringar på produkten.
11. För aldrig in fingrar eller händer i produktens öppningar. Håll ej för eller för in fingrar, händer eller andra objekt i luftutloppen.
12. Fjärrkontrollen ska monteras på väggen eller kringvarande möbel med det fäste som medföljer produkten. Välj en plats som gör det möjligt att nå och manövrera kontrollen medan du sitter på toaletten.
13. Produkten bör endast transporteras i en torr miljö i sin originalförpackning.

Krav för användning av produkten

- Brukaren bör inte väga mer än 130 kg.
- Brukaren måste fysiskt och psykiskt kunna använda produkten på ett säkert sätt.

Grundläggande instruktioner



Avsedd användning

Denna produkt är endast avsedd som ett hjälpmedel för att gå på toaletten. Produkten får på egen hand endast användas av personer som fysiskt och mentalt kan hantera den på ett säkert sätt. All annan användning är förbjuden.

Produkten har en rengörings- och torkfunktion som är nödvändig och användbar för personer med sjukdom eller funktionsnedsättning som på grund av betydande funktionsunderskott gör det svårt för dem att rengöra sig på vanligt sätt efter ett toalettbesök.

Denna produkt är en elektrisk enhet ansluten till en vattenkälla. Produkten är avsedd att användas i badrumsmiljö och ska installeras på ett passande toalettporlin, golvstående eller vägghängd skål.

För produkter som använder nätsladdar med integrerade jordningskontakter:

Denna produkt måste jordas. I händelse av en elektrisk kortslutning minskar jordningen risken för elchock genom att tillhandahålla en utrymningskabel för den elektriska strömmen. Bidésitsen är utrustad med en sladd som har en jordledning med en jordad kontakt. Denna kontakt måste anslutas till ett uttag som är korrekt installerat och jordat (GFI).

FARA: felaktig användning av jordningskontakten kan leda till risk för elchock.

Om du behöver reparera eller byta ut sladden eller kontakten ska du alltid koppla ur Bidésitsen. **Den gröna ledningen med gula ränder är jordkabeln.**

Kontrollera med en kvalificerad elektriker om jordningsinstruktionerna inte är helt förstådda eller i tvivel om produkten är ordentligt jordad.

Jasmin Care Bidet är en elektrisk produkt ansluten till vatten.

Denna produkt ansluts endast med jordat uttag och jordfelsbrytare.

FARA: Felaktig användning av sladd och kontakt kan ge ökad risk för elektrisk stöt.








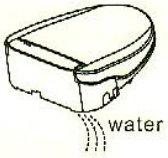
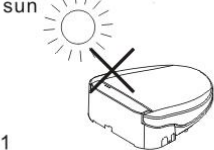
Jasmin Care Bidet är tillverkad med jordat uttag. Kontakten får bara installeras i stickkontakt som är korrekt ansluten.



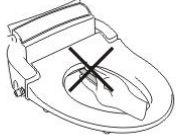

Kontrollera alltid med behörig elektriker om grundläggande information är svår att förstå eller om det finns osäkerhet kring om produkten är rätt installerad.

Läs och spara denna information




Säkerhetsföreskrifter

<p>Häll aldrig vatten på produkten. (Fig.1)</p>	 <p>Fig. 1</p>	
<p>Lägg aldrig ner sladd/stickkontakt i toaletten. (Fig.2)</p> <p>Om ett föremål tappas i toaletten, dra ur strömmen in du tar upp föremålet. (Fig.2)</p>	 <p>Fig. 2</p>	
<p>Låt inte barn vara ensamma på toaletten. (Fig.4)</p> <p>Se till att personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga endast använder produkten utan övervakning om de kan hantera produkten säkert.</p>	 <p>Fig. 4</p>	
<p>Använd inte locket som ryggstöd. (Fig.5)</p>	 <p>Fig. 5</p>	
<p>Ställ in sitsvärmen till passande temperatur. Ställ den lågt om du har känslig hud. (Fig.6)</p>	 <p>Fig. 6</p>	
<p>Täck aldrig över uppvärmd sits. Locket kan vara nere. (Fig.7)</p>	 <p>Fig. 7</p>	
<p>Om bidén inte ska vara i bruk under en längre tid ska strömmen slås av (Fig.8) och bidén tömmas på vatten (Fig.9).</p>	 <p>Fig. 8</p>  <p>Fig. 9</p>	
<p>Utsätt inte produkten för direkt solljus eller frostrisk. (Fig.11)</p>	 <p>Fig. 11</p>	

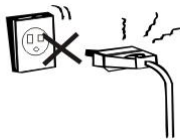
<p>Anslut aldrig till ett defekt eller löst eluttag. Vid tveksamhet, kontakta auktoriserad elektriker. (Fig.12)</p>	 <p>Fig. 12</p>	
<p>Utsätt inte vattenanslutningen för våldsam behandling då detta kan medföra läckage. (Fig.13)</p>	 <p>Fig. 13</p>	
<p>Utsätt inte tvättarmarna för våldsam behandling då de kan förstöras. (Fig.14)</p>	 <p>Fig. 14</p>	
<p>Använd inte toalettrensning, starka rengöringsmedel, lösningsmedel såsom Aceton, Thinner eller dylikt. (Fig.15).</p>	 <p>Fig. 15</p>	
<p>Håll produkten borta från cigaretter, öppen låga och lättantändliga material</p>	<p>Risk för skada</p>	
<p>Gör inga obehöriga ändringar på produkten</p>	<p>Risk för skada</p>	
<p>För aldrig in fingrar eller händer i produktens öppningar. Håll ej för eller för in fingrar, händer eller andra objekt i luftutloppen.</p>	<p>Varning! Elektrisk stöt / Elchock</p>	
<p>Fjärrkontrollen ska monteras på väggen eller kringvarande möbel med det fäste som medföljer produkten. Välj en plats som gör det möjligt att nå och manövrera kontrollen medan du sitter på toaletten.</p>	<p>Försiktighetsåtgärd</p>	

Uppackning av Jasmin Care


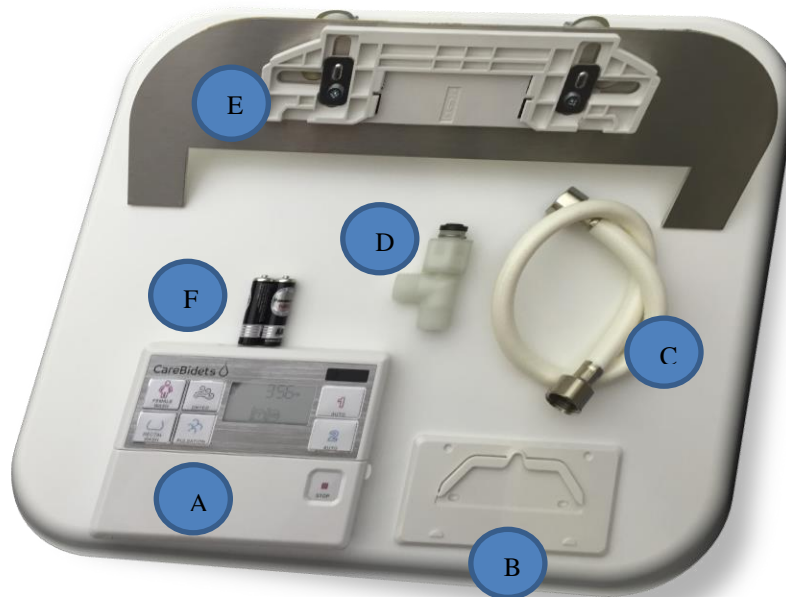


- * Elektrisk bidé (ej med på bilden)
- * Fjärrkontroll **A**
- * Väggh monteringsplatta till fjärrkontroll **B**
- * Flexslang för vattenanslutning **C**
- * T-koppling **D**
- * Monteringskonsol med bottenplatta, justeringsskivor, vingmuttrar samt **click on** beslag **E**
- * Batterier 2 stk. (AA) **F**

Följande verktyg behövs vid montering

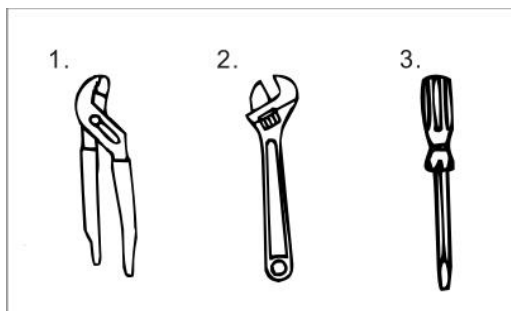

Beskrivning av fjärrkontroll

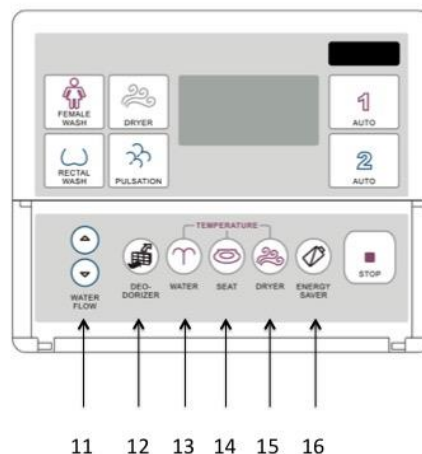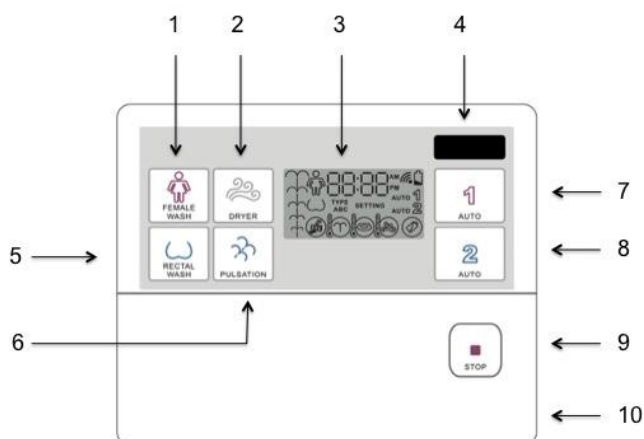

1. Dusch framtill
2. Lufttorkning
3. Display
4. IR sensor
5. Dusch rektal
6. Pulserande vattenstråle
7. Auto program 1
8. Auto program 2
9. Stopp
10. Barnsäkerhet

- Aktiverar den feminina duschen
- Aktiverar torkfunktion
- Visar funktionsstatus
- Infraröd sändare
- Aktiverar duscharm rektal tvätt
- Aktiverar pulserande vattenstråle (kan först slås på när dusch är aktiv)
- Aktiverar personligt tvättprogram 1
- Aktiverer personligt tvättprogram 2
- Avslutar pågående funktion
- Barnsäkerhet med inställningsmöjlighet

Inställningar (innanför luckan)


11. Vattentryck
12. Deodorizer
13. Vattentemperatur
14. sitsvärme
15. Lufttemperatur
16. Eco standby mode (standard inställning)

- Reglerar vattentryck i 5 lägen
- Luftrenare aktiveras
- Reglerar vattentemp i 4 lägen
Vid upprepade tryck
- Reglerar sitsvärme i 4 lägen
Vid upprepade tryck
- Reglerar lufttemp. i 4 lägen
Vid upprepade tryck
- Sits och vattentemp sänks (Energisparläge - När du sätter dig på sitsen värms sits och vatten till vald inställning automatiskt)

De valda inställningarna visas i displayfönstret och sparas automatiskt i bidésitsens minne.

Så här används Jasmin Care

Sätt dig långt bak på Jasmin Care bidé och luta dig lite framåt med överkroppen innan du aktiverar bidésitsens funktioner. Observera att bidésitsens funktioner aktiveras först när du sitter på sitsen eller trycker ner sitsen bak på höger sida.

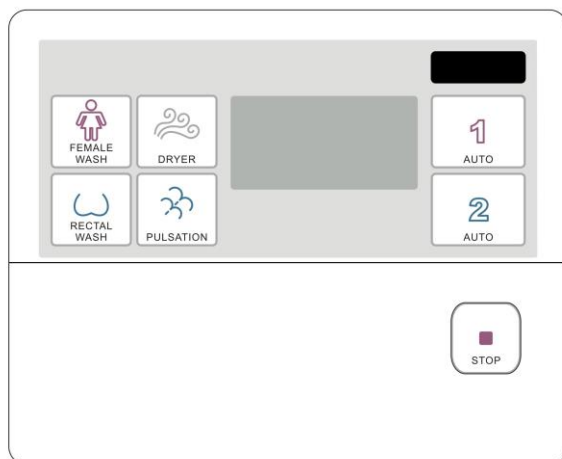

FEMALE
WASH

Aktiverar feminin dusch. Rekommenderad tvättid: 10 sekunder



RECTAL
WASH

Aktiverar rektal dusch. Rekommenderad tvättid: 30 – 40 sekunder



DRYER

Aktiverar torkfunktion. Rekommenderad torktid 3 – 5 min.



PULSATION

Aktiverar pulserande dusch när feminin eller rektal tvätt används



STOP

Stoppar pågående funktion



AUTO

Aktiverar automatisk dusch och torkprogram 1. Programmet kan ställas in efter dina önskemål.



AUTO

Aktiverar automatisk dusch och torkprogram 2. Programmet kan ställas in efter dina önskemål.

När du är färdig lämnar du sitsen och bidén rengör automatiskt munstyckena och går ner i energisparläge. Den är nu redo till nästa gång den ska användas.

Multifunktionsknapp på Jasmin Care

På bidesitsens vänstra sida finns en multifunktionsknapp (se bild).
Med den kan följande funktioner utföras:

När du INTE sitter på sitsen

- * Ett tryck - munstyckena rengörs automatiskt
- * Tryck och håll knappen inne i ca 10 sek - bidésitsen stängs av.


När du sitter på sitsen

- * Ett tryck – Auto program 1 startar – ett ytterligare tryck avslutar programmet
- * Två tryck – Auto program 2 startar – ett ytterligare tryck avslutar programmet



Anslutning till extern tryckknapp START/STOPP

Extern tryckknapp ansluts till Jasmin Care bidésits via miniuttaget på den medföljande fjärrkontrollen.

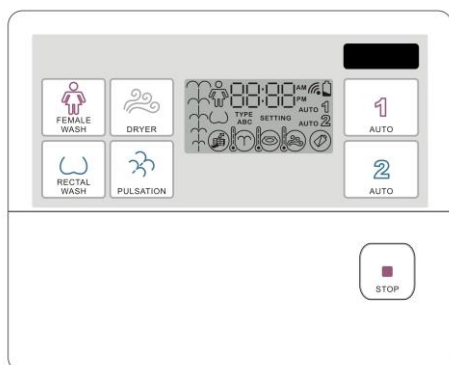

Miniuttag för anslutning av extern tryckknapp START/STOPP

Ett tryck på START/STOPP knappen aktiverar det dusch -och torkprogram som är inställt och lagrat under  programmet.

AUTO





Bidésitsen utför nu dusch- och torkprogrammet enligt dina personliga inställningar som är lagrade i bidéns minnesfunktion (se sidan 14).




Top Hygien säljer START/STOPP tryckknappar som kan placeras på vägg, golv och armstöd. Det finns även START/STOPP tryckknapp som kan integreras i armstöd eller toalettlyft.




Inställning av automatisk dusch och torkprogram




Jasmin Care bidésits är utrustad med en automatfunktion som gör det möjligt att köra både dusch och torkprogram med en knapptryckning. Det finns möjlighet att lagra två personers individuella inställningar i bidésitsens minne.




Inställning och lagring av autofunktioner




* Tryck på  eller  och håll knappen intryckt i ca. 5 sekunder. I displayen blinkar nu symbolen för feminin dusch samt vattentrycksymbolen. Du kan nu ställa in önskat vattentryck på den feminina duschen genom att trycka på   knapparna tills det önskade vattentrycket visas i displayen.

* Tryck därefter på  knappen för feminin tvätt. Symbol för feminin tvätt, samt duschtid blinkar. Du kan nu ställa in den önskade duschtiden från 0 till 25 sekunder, genom att trycka på   knapparna tills den önskade duschtiden visas på displayen.

* Tryck därefter på  knappen för rektal dusch. Symbolen för rektal dusch samt vattentryck symbolen blinkar. Du kan nu ställa in önskat vattentryck för den rektala duschen, genom att trycka på   knapparna tills det önskade vattentrycket visas i displayen.

* Tryck igen på  knappen för rektal dusch. Symbolen för rektal dusch samt duschtid blinkar. Du kan nu ställa in önskad duschtid från 0 till 50 sekunder, genom att trycka på   knapparna tills den önskade duschtiden visas i displayen.

* Tryck på  knappen, och symbolen för torktemperatur blinkar. Du kan nu ställa in temperaturen på lufttorken genom att trycka på   knapparna tills den önskade temperaturen visas i displayen.

* Tryck igen på  knappen och tiden för torktid blinkar i displayen. Du kan ändra den önskade torktiden från 0 till 6 minuter genom att trycka på   knapparna tills den önskade torktiden visas i displayen.

* Tryck på  stoppknappen och Bidésitsen avger ett kort pip. Inställningarna är nu lagrade och autofunktionen är klar för användning.

Tänk på att: Om du är för långsam att programmera någon av ovanstående funktioner måste du trycka på Auto 1 eller Auto 2 och hålla intryckt i 5 sekunder för att börja om. Först när symbolen i displayen blinkar kan du börja programmera.

Inställning av klockan (på fjärrkontrollen)

Öppna fjärrkontrollens lucka, så att alla inställningar blir synliga. Håll inne STOP-knappen tills det står SETTINGS och klockans tid blinkar. Timmar ställs in med "pil upp" och minuter med "Pil ner". Tryck på STOP när korrekt tid är inställd.

Släckning av blå nattbelysning i sitsen

Blå nattbelysning i sitsen kommer som standard. Ljuset kan enkelt släckas genom ett tryck på STOP-knappen när bidésitsen inte är aktiverad (när ingen sitter på den).



Var uppmärksam på följande

Munstyckena sköljs automatiskt när du rest dig från bidésitsen.

Det kan ta lite tid för sitsvärmens och vattnets temperatur att komma upp i temperatur – Vi rekommenderar att du förinställer sits och vatten till önskad temperatur.

Om bidén inte ska användas under en period rekommenderar vi att elanslutning och vattentillförsel kopplas bort samt att bidén töms på vatten.

Toaletsitsen kan lossas i vänster sida när den ska rengöras grundligt.

Lossa **INTE** sitsen i höger sida där kopplingar går in, då dessa kan förstöras. Kontrollera noggrant att sitsen klickas fast ordenligt efter rengöring.

För att lossa vattenfiltret används ett lagom stort mynt. **OBS!** Använd **INTE** skruvdragare eller annat verktyg då dessa lätt kan förstöra plasten.

Rengöring

Vid rengöring av din Jasmin, skall endast milda rengöringsmedel användas. Använd **INTE** starka rengöringsmedel, aceton eller andra frätande medel då de förstör plastens yta.

- **Rengöring av bidésits**

Torka bidésitsen ren med en urvriden, fuktig disktrasa med mildt rengöringsmedel. Eftertorka ev med en torr trasa. Skvätt **INTE** vatten på bidésitsen och använd **INTE** microfiber då det kan skada plasten.



Rengör veckovis eller vid behov: Dra försiktigt ut munstyckena till stopp. Tvätta med mildt rengöringsmedel, gärna med en mjuk liten borste.



Var 2. eller 3. månad (beroende på vattnets hårdhet)

Häll ättika eller mild citronlösning över duschmunstycket och duscharm. Låt verka i ca 2 minuter och använd en liten mjuk borste för att ta bort kalkavlagringar. Torka av med en ren trasa.


Vid grundlig rengöring kan sitsen och locket lossas helt.

Bryt strömmen innan du börjar att lossa sitsen.


Locket på sitsen kan tas bort genom att lyfta upp det och dra åt ena sidan tills det lossnar. Därefter kan du enkelt lossa andra sidan.

Fäll upp sitsen i upprätt läge och dra ur den lilla svarta säkerhetspringen i gummi på sitsens vänstra sida. Skjut därefter låsringen uppåt enligt bilden så att sittringen försiktigt kan lossas från sitt fäste. Det är nu enkelt att rengöra sittringens bakre del.

Skjut låsringen uppåt

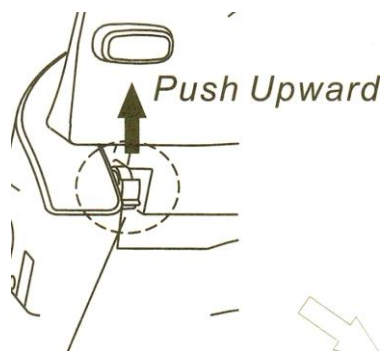

Lyft sittringen uppåt

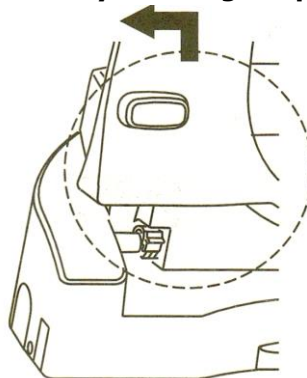

OBS! Dra **INTE** för mycket i ledningen på höger sida när sitsen lyfts uppåt. Kom ihåg att skjuta tillbaka ringen så den blir ordentligt fastmonterad igen.


Underhåll



Bryt alltid strömmen innan underhåll påbörjas.

Rensning av vattenfilter

1. Bryt strömmen och stäng av vattentillförseln.
2. Ta bort gummipackningen och använd ett mynt för att ta bort filtret genom att vrida motsols.
3. Rengör filtret med vatten och en mjuk liten borste. Sätt därefter tillbaka filtret och kontrollera att det sitter korrekt.
4. Återanslut vattentillförseln och strömmen.

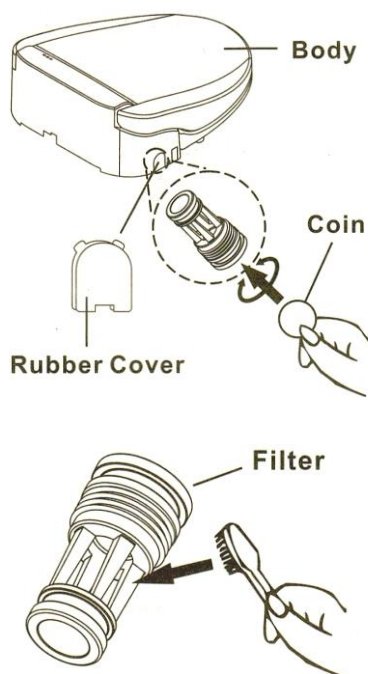


Vattentömning av Jasmin Care

Om du inte ska använda din bidé på en längre period ska den tömmas på vatten enligt nedanstående instruktion.

Ta bort vatten och elanslutning

Montera bort vattentillförsel, tryck på "utlösarknappen" på höger sida av bidén och håll knappen intryckt medan sitsen försiktigt dras ur monteringskenan.

Lossa och öppna dräneringslocket bak på Bidéns undersida med ett passande mynt och låt allt vatten rinna ut. Skruva därefter tillbaka dräneringslocket och skjut därefter tillbaka bidén i monteringskenan. Återanslut sen vatten och elanslutningen. Jasmin är nu redo för att användas igen.

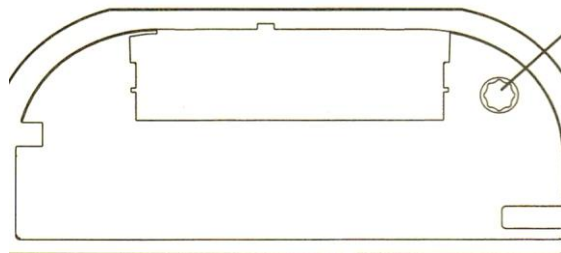

Innan du kontaktar service / Felsökning

Problem	Orsak	Lösning
Vattentrycket är lågt	Inställning på fjärrkontrollen har för lågt tryck	Ändra inställningen som visas på sidan 11
Duscharmen kommer inte fram	Det sitter smuts i duscharmen Du sitter för långt fram på sitsen.	Rengör duscharm enligt instruktion sidan 13 Sätt dig längre bak på sitsen
Duscharmen kommer bara ut halvvägs	Duscharmen är smutsig	Rengör duscharm enligt instruktion sidan 13
Duscharmen kommer inte ut eller avslutar duschning innan programmet är färdigt	Du sitter för långt fram på sitsen. Sensorn känner inte av att du sitter på sitsen	Sätt dig ordentligt och tillräckligt långt bak på sitsen så att sensorn aktiveras.
Duschningen avbryts	Du sitter för långt fram på sitsen	Starta om programmet Dra ur elkontakten och vänta 15 sekunder innan du ansluter igen.
Sitsens temperatur är för låg	Har inte hunnit värmas upp, vänta. Felaktig inställning på sitsvärmen	Låt sitstemperaturen stå på tempererad. Kontrollera inställningen på fjärrkontrollen, se sid.11
Vattentemperaturen är för låg	Har inte haft tillräcklig tid för uppvärmning (3-4 min) Felaktig inställning på fjärrkontrollen.	Förinställ vattentemperaturen på fjärrkontrollen, se sid.11 Gör en liten paus så att vattnet hinner bli varmt igen
Fjärrkontrollen fungerar inte	Batterinivå för låg(displayen visar när de ska bytas.) Fjärrkontrollen är för långt från sitsen	Byt batteri Placera fjärrkontrollen närmare sitsen.

Om det fortfarande är problem med din bidésits efter att ha följt ovanstående instruktioner, kontakta Top Hygien Nordic AB på telefon 031-94 35 26 eller maila till info@vastiacare.se för konsultation.

Observera: Bidén är utrustad med en sittvakt och fungerar endast när denna är aktiverad. Detta för att undvika att sitsen kan spola utan att någon sitter på den. Sitsens högra sida (när du står framför toaletten) ska vara nedtryckt, för att bidén skall fungera.

Kassering av elektronisk och elektrisk utrustning




I enlighet med direktiv 2012/19 / EU (WEEE-II) är tillverkare av elektrisk utrustning skyldiga att ta tillbaka gammal utrustning och bortskaffa den på lämpligt sätt om så önskas. Symbolen indikerar att produkten inte kan kasseras med icke-återvinningsbart avfall. Gammal utrustning kan returneras direkt till din lokala CareBidets-agent, där den kommer att kasseras på lämpligt sätt. Vid egen kassering var vänlig kontakta det företag som sköter den lokala avfallshanteringen för att få information om sortering.

Tekniska specifikationer

Modell artikelnr.		JHC-611	JHC-612
Spänning		230 V	
Nätfrekvens		50 – 60 Hz	
Energiförbrukning		1900W	
Ledningens längd		1,5 m	
Kapslingsklass		IPX4	
Tvätt-funktioner	Värmeväxlare	Obegränsat med varmvatten, 30 ml.	
	Vatten temperatur	Justeras i 4 lägen: Rumtemperatur/ 35°/37,5°/40°	
	Säkerhetsanordningar	Termisk brytare, flödesutrustning med stoppventil och vacuumbrytare	
	Vattenflöde	Justerbar i 4 lägen: ca 1,2 L/min.	
Sitsvärme	Sitsvärme	Justerbar i 4 lägen: Rumtemperatur/35°/37,5°/40°	
	Energiförbrukning	55W	
	Säkerhetsanordningar	Inbyggd termisk brytare	
Vattenflöde tryck		0,7 – 10 bar (10 psi -140 psi)	
Säkerhetsanordningar		Jordfelsbrytare, sittvaktsbrytare	
Lufttork	Luft temperatur	Justerbar i 3 lägen, 35° - 70°	
	Energiförbrukning	400W	
Netto vikt		4,1 kg	
Max brukarvikt		130 kg.	130 kg.
Certifieringar		CE, VA, EN1717 Category 5	

Mått på modell Jasmin Care / XL

Bidésits	JHC-611	JHC-612
A	46 cm	49 cm
B	43 cm	46 cm
C	14-17 cm	
D	41 cm	
Öppning sits	260 x 200 mm	290 x 200 mm

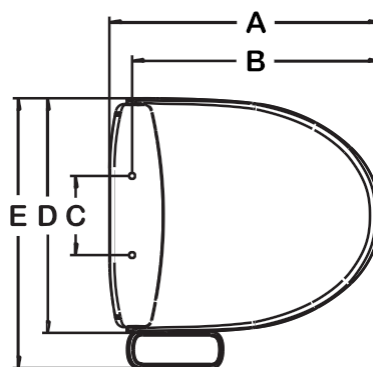

Monteringsvägledning

Jasmin Care skall vara monterad så att det inte finns risk att den översköljs med vatten. Bidéns placering skall vara i våtzon 2 eller 3. Vid placering i våtzon 2 skall snabbkoppling användas (Extra tillbehör som kan köpas av Top Hygien AB Telefon 031-94 35 26).

1) Demontera den befintliga toalettsitsen

2) Fäst monteringskonsolen med avsedda skruvar, brickor och vingmutter. Kontrollera att konsolen är centrerad och att muttrarna är ordentligt dragna.



3) Justera **click on**-skenan med de 2 förmonterade stjärnskruvarna så att avståndet från bakkant på skenan till framkant på cisternen blir 2 mm. Dra åt dom två stjärnskruvarna.



4) Montera bidesitsen försiktigt på **click on**- skenan
Tryck sedan sitsen försiktigt bakåt mot cisternen tills ett "klick" hörs.



5) Kontrollera att sitsen sitter ordentligt fast samt att knappen för att lossa sitsen från **click on**- skenan är i neutralt läge. Se bild.



6) Stäng av vattentillförseln vid matningen.




7) Lossa ventilen från toalettstolen och montera medföljande T-koppling/stycke på toalettens vattentillförsel och montera därefter avstängningsventilen under T-kopplingen/stycket. Efterdra alla anslutningar.



OBS! Anslut alltid vatten före ström

8) Montera vattenslangen på bidésitsens vattenanslutning, som sitter på vänster sida. Öppna därefter vattentillförseln via matningen och kontrollera att installationen är tät.

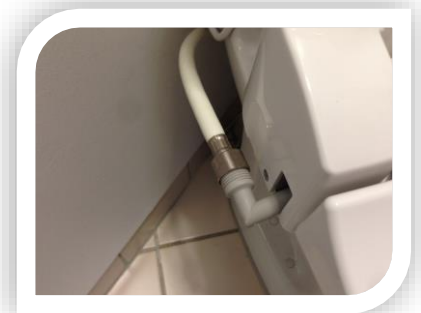

9) Montera fjärrkontrollen på lämplig plats. Använd medföljande beslag.



10) Sätt i stickkontakten i ett jordat 230V uttag. Bidén ska alltid vara anslutet till godkänd jordfelsbrytare.



11) Nu fylls vattentanken automatiskt med vatten. Ställ in önskade inställningar på fjärrkontrollen och din Jasmin Care är färdig att användas.



OBSERVERA: Om bidésitsen blinkar och startar – då är strömmen påslagen före vattentillförseln. Åtgärda detta genom att dra ur stickkontakten/bryt strömmen och vänta några sekunder. Kontrollera att vattentillförseln är påslagen och anslut därefter strömmen igen.

OBSERVERA: Bidésitsen fungerar endast när sittvakten är aktiverad. Sittvakten aktiveras genom att antingen sitta på ringen eller att sittringen trycks ned i bakre högra sidan (när du står framför toaletten).