



**Renlighet är N°1**



## **Bruksanvisning Bidéra Automatik**

Top Hygien +46 (0)31 943526  
info@tophygien.se www.tophygien.se

# Bruksanvisning Bidéra Automatik

## Produktbeskrivning

Bidéra Automatik är en automatisk bidétillsats med dusch och torkfunktion som monteras på befintligt porslin/toalettstol.

Bidéra Automatik kan på ett enkelt sätt programmeras så att alla kan använda den, oavsett förutsättningar.

Bidéra Automatik är extra lätt att sköta och lätt att hålla ren! Den spoljar rent och torkar torrt helt automatiskt. Ett lätt tryck på touchkontrollen startar dusch- och torkningsprogrammet med marknadens effektivaste tork. Balansen mellan den främre och bakre duschstrilen kan ställas in så att den duschar där den gör bäst nytta. Tack vare en smart funktion i sittringen, startar inte programmet om inte någon sitter på ringen

Bidéra Automatik passar de vanligaste förekommande WC stolarna i Sverige. Installationen förutsätter tillgång till varmt och kallt vatten samt 220 volt.

Bidéra Automatik är fabriksinställd med lämpliga inställningar, men dessa kan givetvis justeras.

## Tekniks data

Max brukarvikt 160 kg

Sittring och lock av ABS-aktylplast

Metalldelar av rostfritt stål

Vattenslang av polyten

2 års fabriksgaranti

## Manöverenhet

Inspänning: 230 V ~ 50 Hz

Manöverspänning: 24 V DC

Kapslingsklass: IP 65

## Standardinställning

Dusch: 1 minut

Tork: 4 minuter

## Startknapp

En lättryckt knapp för handmanövrering

### **Avsedd användning av Bidera Automatik**

Läs bruksanvisning före användning. Det är viktigt att helt och fullt förstå innehållet i bruksanvisningen. Kontakta Top Hygien om oklarheter finns eller frågor uppstår.

Bidéra Automatik ska installeras av behörig person enligt Top Hygiens installationsanvisningar.

Använd INTE och montera inte delar från tredje part på produkten, som inte är godkända av Top Hygien. Om ej godkända tillbehör används kan inte Top Hygien längre garantera att säkerhetsbestämmelserna uppfylls.

Garantier gäller endast om produkten används under angivna förhållanden samt för avsedda syften. Top Hygien avsäger sig ansvar för skador och fel som uppkommit på grund av slarv, olycka eller olämpligt användningssätt.

### **Säkerhetsföreskrifter**

Försäkra er om att Bidéra Automatik är monterad enligt monteringsanvisningar innan användning.

Denna produkt är inte avsedd att användas av personer (gäller även barn) med nedsatt fysik/mental förmåga eller brist på erfarenhet, om de inte övervakas eller instrueras angående användning av produkten av person med ansvar för deras säkerhet.

Barn ska övervakas för att säkerställa att de inte leker med denna produkt.

### **Skötselråd**

#### **Sittring**

- Sittringen rengörs med mildt rengöringsmedel.
- Luftstyrningen (kåsan), som sitter under sitsen i bakkant, tas bort genom att vrida de vita vreden ett kvarts varv.
- Silarna i sittringen avkalkas med kalklösare (kalkosan) ungefär två gånger om året (oftare vid kalkhaltigt vatten).

#### **Torkaggregat**

- Insugningsfiltret på undersidan av apparaten skall sugas rent från damm varje månad med dammsugare.

Kontrollera Bidéras fästsättning med jämna mellanrum. Använd vid behov insexnyckeln för att efterdrag skruvarna på ovansidan av fästbeslagen.




## Bidera Automat med sittvakt.

Duschningen ställs in efter behov. Så att vattnet kommer bakifrån eller både bak och fram. Kranen för inställningen sitter i sittringen under kåsan. Vattenvredet på blandaren skall alltid vara öppen (peka nedåt) och termostaten normalt på max. Den ger då 37 gradigt vatten. Termostaten är spärrad och kan aldrig ge varmare vatten.



1

Sitt på sitsen. Om du provar funktionerna stående måste du hålla handen kl halv fyra på sittringen framifrån för att aktivera sittvakten samt hålla för strilmunstyckena med handen så det inte sprutar vatten på golvet.

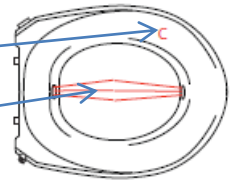

2

Starta duschningen genom att hålla startknappen intryckt i 2-3 sekunder. Detta är en säkerhetsfunktion för att den inte ska starta av misstag.



3

Innan vattnet har rätt temperatur startar förspolningen. Den spolar genom en egen koppling rakt ner i toaletten så att vattnet ej träffar huden. När vattnet är rätt tempererat startar duscharna fullt. Duschningen tar ca 1 minut.

37°

4

Efter duschningen startar torkningen som pågår i cirka 4 minuter.