

# CareBidets

Användar- och installations  
manual modell Jasmin Care<sub>2.0</sub>

JHC511/512



Läs denna manual noggrant före användning och installation

Viktiga säkerhetsregler	3
Grundläggande instruktioner	4
Säkerhetsföreskrifter	5-6
Uppackning av din Jasmin Care	7
Beskrivning av Fjärrkontrollen	8
Så här ska Jasmin Care användas	9-10
Multifunktionsknapp på Jasmin Care	10
Anslutning av extern fjärrkontroll	10
Inställning av automatiskt spol- och torkprogram	11
Var uppmärksam på följande	12
Rengöring	13-14
Underhåll	14-15
Före du ringer efter service	16-17
Tekniska specifikationer	18
Monteringsvägledning	19-21

tillbehör

Model nr. \_\_\_\_\_

Serie nr. \_\_\_\_\_

Köp datum \_\_\_\_\_

Installatör namn/telefon \_\_\_\_\_

Serienumret finner du på bidéns "namnskyt". Du bör notera modellens typ, serienumret samt behålla denna manual.

# Viktiga säkerhetsregler

Vid bruk av alla elektriska produkter, särskilt om barn närvarar skall de grundläggande säkerhetsreglerna alltid följas. Detta inkluderar följande:

## Läs alla instruktioner före montering och användande.

### **FARA**

För att minska risken för elektrisk stöt skall följande iakttagas:

1. Produkten får inte användas vid dusch och får inte översköljas av vatten
2. Sitt inte på din Jasmin Care med våta fötter eller om golvet är blött.
3. Om en strömförande produkt hamnar i vattnet ska strömmen brytas. Först när strömmen är bruten kan produkten tas upp ur vattnet. Skicka produkten till auktoriserad verkstad för reparation innan den tas i bruk.

### **WARNING**

För att minska risk för elektrisk stöt, brännsår, eld eller annan skada på person skall följande beaktas:

1. Använd produkten enligt denna manual. Använd inte andra tillbehör än de som rekommenderas av tillverkaren.
2. Använd aldrig produkten om följande inträffat:
  - Trasiga ledningar eller stickkontakt
  - Produkten inte fungerar korrekt.

Ta bort strömförsörjningen och vattenanslutningen och lämna produkten för service/reparation hos auktoriserad verkstad.

3. Håll sladdar borta från värme.
4. Blockera aldrig lufthålen på produkten. Låt den aldrig stå på blöt yta. Håll produkten ren från hår, dammpartiklar och smuts.
5. Täpp aldrig till öppningar och slangar.
6. Använd inte produkten utomhus eller där spray eller syrgasflaskor används eller förvaras.
7. Anslut endast produkten till jordat uttag och jordfelsbrytare.

## **Grundläggande instruktioner**

Jasmin Care bidet är en elektrisk produkt ansluten till vatten.

**Denna produkt ansluts endast med jordat uttag och jordfelsbrytare.**

FARA: Felaktig användning av sladd och kontakt kan ge ökad risk för elektrisk stöt.


Jasmin Care Bidet är tillverkad med jordat uttag. Kontakten får bara installeras i stickkontakt som är korrekt ansluten.

Kontrollera alltid med behörig elektriker om grundläggande information är svår att förstå eller om det finns osäkerhet kring om produkten är rätt installerad.


## **Läs och spara denna information**

# Säkerhetsföreskrifter

Häll aldrig vatten på produkten (Fig.1)

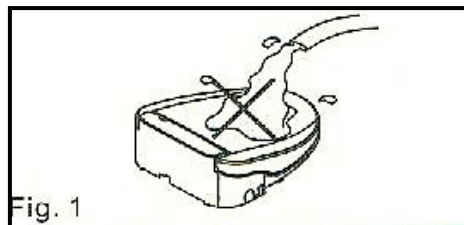


Lägg aldrig ner sladd/stickkontakt i toaletten (Fig.2)

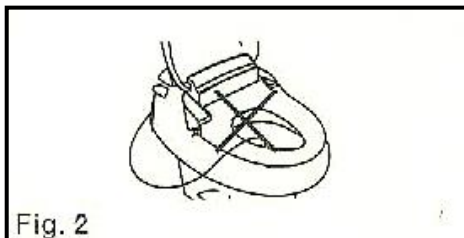


Använd inte locket som ryggstöd och låt inte barn vara ensamma på toaletten (Fig.5)




Ställ in sitsvärmens till passande temperatur (Fig. 6)

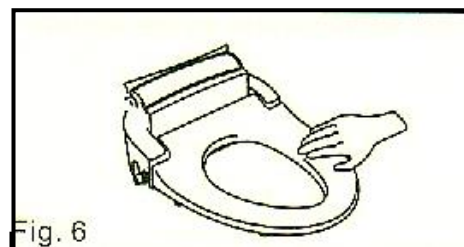


Täck aldrig över uppvärmd sits. Locket får gärna vara Nere. (Fig. 7)

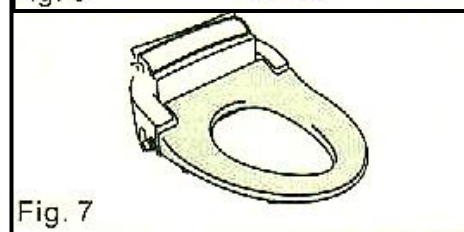

Om bidén inte ska vara i bruk under en längre tid Ska strömmen slås av (fig 8) och tömmas På vatten (fig9), se beskrivning på sid 15.

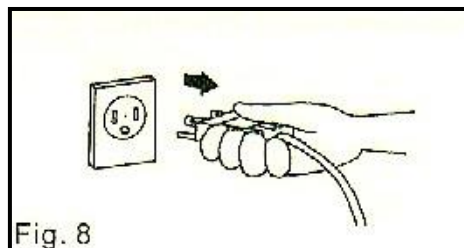

Utsätt inte produkten för direkt solljus eller frostrisk, Skada kan uppkomma. (Fig.10)

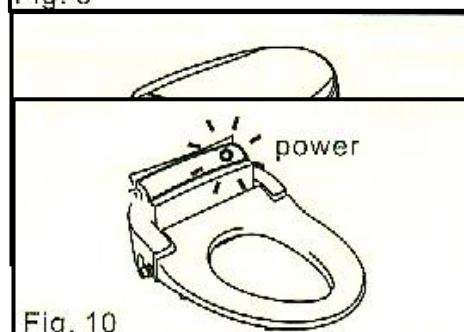


Anslut aldrig, defekt eller löst eluttag.  
Vid tveksamhet, kontakta auktoriserad elektriker  
(Fig.12)


Utsätt inte vattenanslutningen för våldsam behandling  
då detta kan medföra läckage (Fig.13)

Utsätt inte tvättarmarna för våldsam behandling  
då de kan förstöras ( Fig. 14 )

Använd inte toalettrensning, starka rengöringsmedel,  
lösningsmedel såsom Aceton, Thinner eller dylikt.  
Läs mer om rengöring sid 13-14

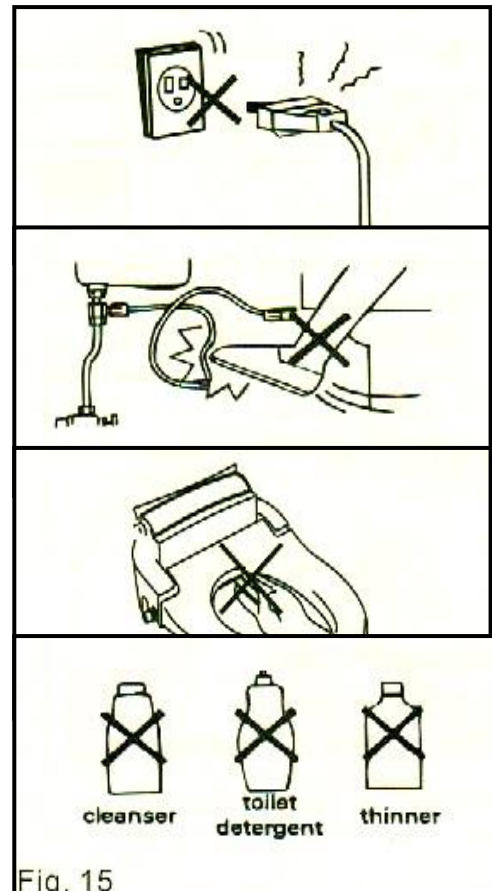

# Uppackning av Jasmin Care

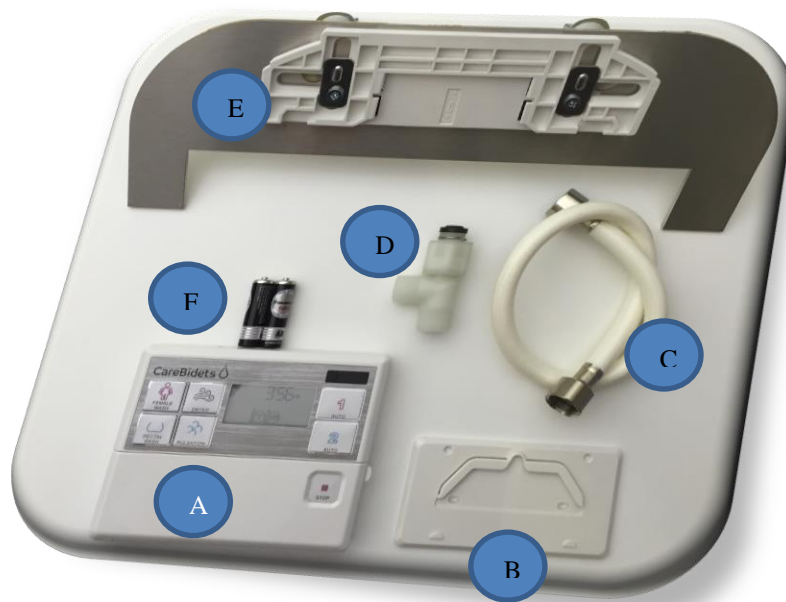

- \* Elektrisk bidé ( ej med på bilden )
- \* Fjärrkontroll **A**
- \* Väggh monteringsplatta till fjärrkontroll **B**
- \* Flexslang för vattenanslutning **C**
- \* T-koppling **D**
- \* Monteringskonsol med bottenplatta, justeringsskivor, vingmuttrar samt **click on** beslag **E**
- \* Batterier 2 stk. (AA) **F**

Följande verktyg behövs vid montering

1.





2.



3.



# Beskrivning av fjärrkontroll

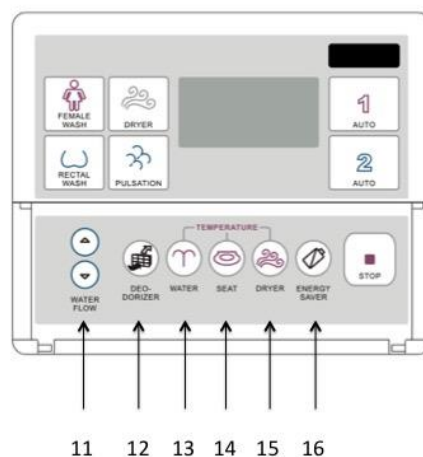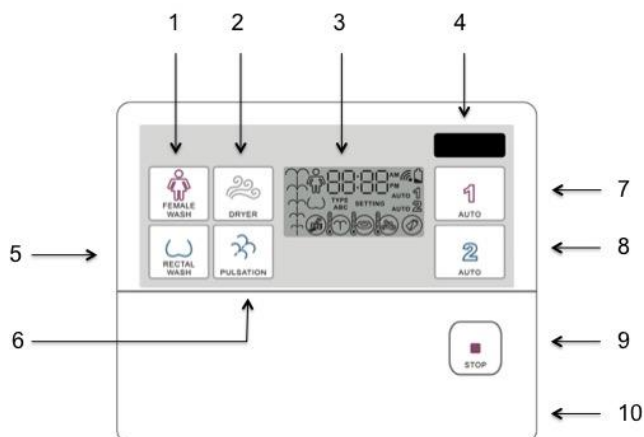

- |   |  |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dusch framtill</li> <li>2. Lufttorkning</li> <li>3. Display</li> <li>4. IR sensor</li> <li>5. Dusch rektal</li> <li>6. Pulserande vattenstråle</li> <br/> <li>7. Auto program 1</li> <li>8. Auto program 2</li> <li>9. Stopp</li> <li>10. Barnsäkerhet</li> </ol> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aktiverar den feminina duschen</li> <li>- Aktiverar torkfunktion</li> <li>- Visar funktionsstatus</li> <li>- Infraröd sändare</li> <li>- Aktiverar duscharm rektal tvätt</li> <li>- Aktiverar pulserande vattenstråle (kan först slås på när dusch är aktiv)</li> <li>- Aktiverar personligt tvättprogram 1</li> <li>- Aktiverer personligt tvättprogram 2</li> <li>- Avslutar pågående funktion</li> <li>- Barnsäkerhet med inställningsmöjlighet</li> </ul> |
|---|--|

## Inställningar (bakom luckan)


- |   |   |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>11. Vattentryck</li> <li>12. Deodorizer</li> <li>13. Vattentemperatur</li> <li>14. sitsvärme</li> <li>15. Lufttemperatur</li> <li>16. Eco standby mode (standard inställning)</li> </ol> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reglerar vattentryck i 5 lägen</li> <li>- Luftrenare aktiveras</li> <li>- Reglerar vattentemp i 4 lägen<br/>Vid upprepade tryck</li> <li>- Reglerar sitsvärme i 4 lägen<br/>Vid upprepade tryck</li> <li>- Reglerar lufttemp. i 4 lägen<br/>Vid upprepade tryck</li> <li>- Sits och vattentemp sänks (Energisparläge - När du sätter dig på sitsen värms sits och vatten till vald inställning automatiskt)</li> </ul> |
|---|---|

De valda inställningarna visas i displayfönstret och sparas automatiskt i bidésitsens minne.



## Så här används Jasmin Care

Sätt dig långt bak på Jasmin Care bidé och luta dig lite framåt med överkroppen innan du aktiverar bidésitsens funktioner. Observera att bidésitsens funktioner aktiveras först när du sitter på sitsen eller trycker ner sitsen bak på höger sida.

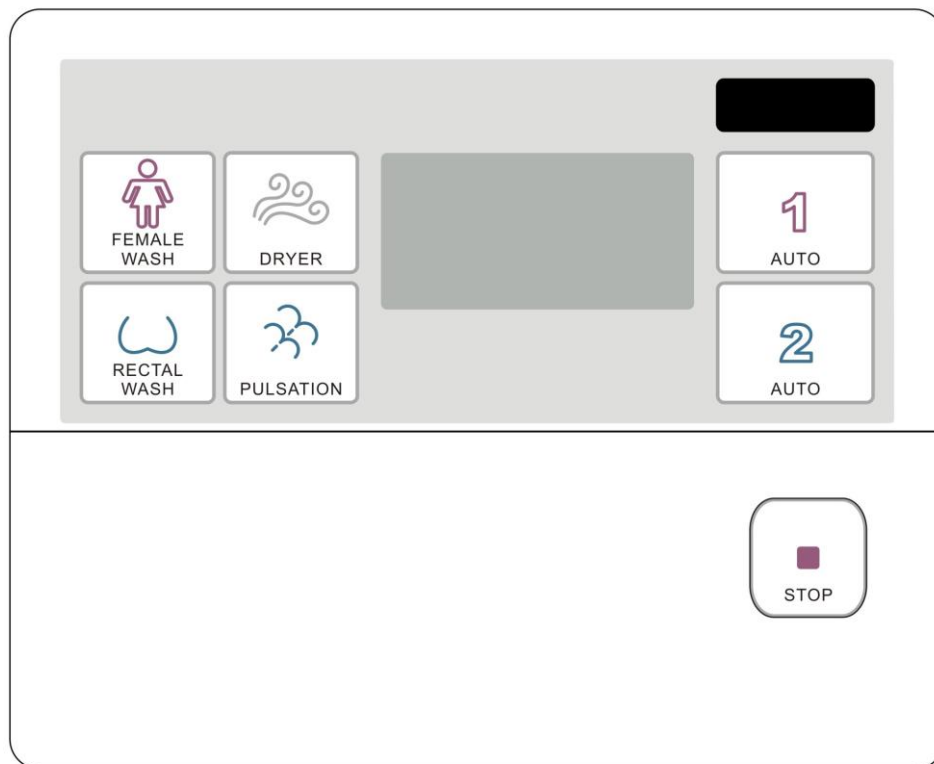

Aktiverar feminin dusch. Rekommenderad tvättid: 10 sekunder



Aktiverar rektal dusch. Rekommenderad tvättid: 30 – 40 sekunder



Aktiverar torkfunktion. Rekommenderad torktid 3 – 5 min.



Aktiverar pulserande dusch när feminin eller rektal tvätt används



Stoppar pågående funktion

1  
AUTO

Aktiverar automatisk dusch och torkprogram 1. Programmet kan ställas in efter dina önskmål. Se sidan 11

2  
AUTO

Aktiverar automatisk dusch och torkprogram 2. Programmet kan ställas in efter dina önskmål. Se sidan 11

När du är färdig lämnar du sitsen och den går automatisk ner i energisparläge, och är redo till nästa gång den ska användas.

## Multifunktionsknapp på Jasmin Care

På bidesitsens vänstra sida finns en multifunktionsknapp (se bild). Med den kan följande funktioner utföras:

När du INTE sitter på sitsen

- \* Ett tryck - duscharna rengörs automatiskt
- \* Tryck och håll inne ca 10 sek - bidésitsen stängs av.


När du sitter på sitsen

- \* Ett tryck – rektal dusch startar – ett ytterligare tryck avslutas dusch
- \* Två tryck – feminin dusch startar – ett ytterligare tryck avslutas dusch



## Anslutning till extern tryckknapp START/STOPP

Extern tryckknapp ansluts till Jasmin Care bidésits via miniuttaget på den medföljande fjärrkontrollen.

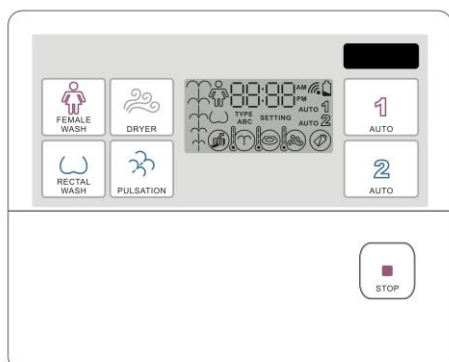

Miniuttag för anslutning av extern tryckknapp START/STOPP

Ett tryck på START/STOPP knappen aktiverar det dusch -och torkprogram som är inställt och lagrat under  programmet.

AUTO





Bidésitsen utför nu dusch- och torkprogrammet enligt dina personliga inställningar som är lagrade i bidéns minnesfunktion (se sidan 11).




Top Hygien säljer START/STOP tryckknappar som kan placeras på vägg, golv och armstöd. Det finns även START/STOPP tryckknapp som kan integreras i armstöd eller toalettlyft.




## Inställning av automatisk dusch och torkprogram




Jasmin Care bidésits är utrustad med en automatfunktion som gör det möjligt att köra både dusch och torkprogram med en knapptryckning. Det finns möjlighet att lagra två personers individuella inställningar i bidésitsens minne.


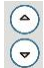
### Inställning och lagring av autofunktioner



\* Tryck på  eller  och håll knappen intryckt i ca. 5 sekunder. I displayen blinkar nu symbolen för feminin dusch samt vattentrycksymbolen. Du kan nu ställa in önskat vattentryck på den feminina duschen genom att trycka på   knapparna tills det önskade vattentrycket visas i displayen.

\* Tryck därefter på  knappen för feminin tvätt. Symbol för feminin tvätt, samt duschtid blinkar. Du kan nu ställa in den önskade duschtiden från 0 till 25 sekunder, genom att trycka på   knapparna tills den önskade duschtiden visas på displayen.

\* Tryck därefter på  knappen för rektal dusch. Symbolen för rektal dusch samt vattentryck symbolen blinkar. Du kan nu ställa in önskat vattentryck för den rektala duschen, genom att trycka på   knapparna tills det önskade vattentrycket visas i displayen.

\* Tryck igen på  knappen för rektal dusch. Symbolen för rektal dusch samt duschtid blinkar. Du kan nu ställa in önskad duschtid från 0 till 50 sekunder, genom att trycka på   knapparna tills den önskade duschtiden visas i displayen.

\* Tryck på  knappen, och symbolen för torktemperatur blinkar. Du kan nu ställa in temperaturen på lufttorken genom att trycka på  knapparna tills den önskade temperaturen visas i displayen.

\* Tryck igen på  knappen och tiden för torktid blinkar i displayen. Du kan ändra den önskade torktiden från 0 till 6 minuter genom att trycka på  knapparna tills den önskade torktiden visas i displayen.

\* Tryck på  stoppknappen och Bidésitsen avger ett kort pip. Inställningarna är nu lagrade och autofunktionen är klar för användning.

## Inställning av klockan (på fjärrkontrollen)

Öppna fjärrkontrollens lucka, så att alla inställningar blir synliga. Håll inne STOP-knappen tills det står SETTINGS och klockans tid blinkar. Timmar ställs in med "pil upp" och minuter med "Pil ner". Tryck på STOP när korrekt tid är inställd.

## Släckning av blå nattbelysning i sitsen

Blå nattbelysning i sitsen kommer som standard. Ljuset kan enkelt släckas genom ett tryck på STOP-knappen när bidésitsen inte är aktiverad (när ingen sitter på den).

## Var uppmärksam på följande

Munstyckena sköljs automatiskt när du rest dig från bidésitsen.

Det kan ta lite tid för sitsvärmen och vattnet att komma upp i temperatur – Vi rekommenderar att du förinställer sits och vatten till önskad temperatur.

Om bidén inte ska användas under en period rekommenderar vi att elanslutning och vattentillförsel kopplas bort samt att bidén töms på vatten. (se sidan 15 )

Toaletsitsen kan lossas i vänster sida när den ska rengöras grundligt. (se sidan 13)

Lossa INTE sitsen i höger sida där kopplingar går in, då dessa kan förstöras. Kontrollera noggrant att sitsen klickas fast ordenligt efter rengöring.

För att lossa vattenfiltret används ett lagom stort mynt. OBS! Använd INTE skruvdragare eller annat verktyg då dessa lätt kan förstöra plasten.

# Rengöring

Vid rengöring av din Jasmin, skall endast milda rengöringsmedel användas. Använd INTE starka rengöringsmedel, aceton eller andra frätande medel, då de förstör plastens yta.

- **Rengöring av bidésits**




Torka bidésitsen ren med en urvriden, fuktig disktrasa med mildt rengöringsmedel. Eftertorka ev med en torr trasa. Använd INTE microfiber då det kan skada plasten.

- **Rengöring av bidésits**

Dra försiktigt ut duscharmarna till stopp:

**Rengör veckovis eller vid behov:** Tvätta duscharmarna med mildt rengöringsmedel, gärna med en mjuk liten borste.

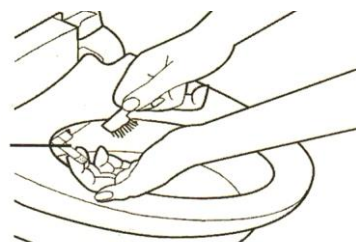

**Var 2. eller 3. månad (beroende på vattnets hårdhet)**

Häll ättika eller mild citronlösning över duschmunstycket och duscharm. Låt verka i ca 2 minuter och använd en liten mjuk borste för att ta bort kalkavlagringar. Torka av med en ren trasa.


**Vid grundlig rengöring kan sitsen lossas helt.**  
***(Läs först hela instruktionen nedan)***

***1. Bryt strömmen innan du börjar att lossa sitsen.***


Locket på sitsen kan tas bort genom att lyfta upp det och dra åt ena sidan tills det lossnar. Därefter kan du enkelt lossa andra sidan.

Fäll upp sitsen i upprätt läge och dra ur den lilla svarta säkerhetssprinten i gummi på sitsens vänstra sida. Skjut därefter låsringen uppåt enligt bilden så att sittringen försiktigt kan lossas från sitt fäste. Det är nu enkelt att rengöra sittringens bakre del.

**Skjut låsringen uppåt**

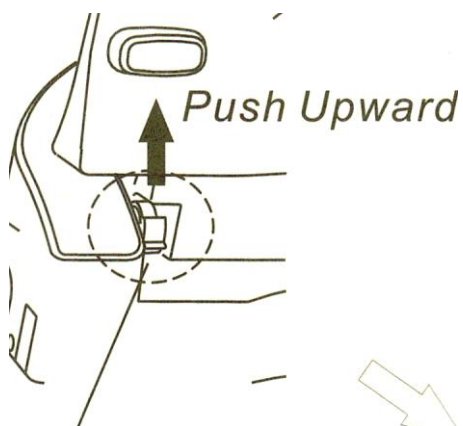

**Lyft sitteringen uppåt**

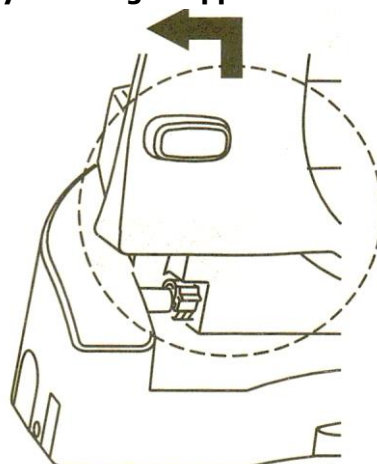



OBS! Dra INTE för mycket i ledningen på höger sida när sitsen lyfts uppåt. Kom ihåg att skjuta tillbaka ringen så den blir ordentligt fastmonterad igen.

## Rensning av vattenfilter

1. Bryt elanslutning och vattentillförsel

2. Ta bort gummipackningen och använd ett mynt för att ta bort filtret genom att vrida motsols.

3. Rengör filtret med vatten och en mjuk liten borste. Sätt tillbaka filtret och kontrollera att det sitter korrekt.

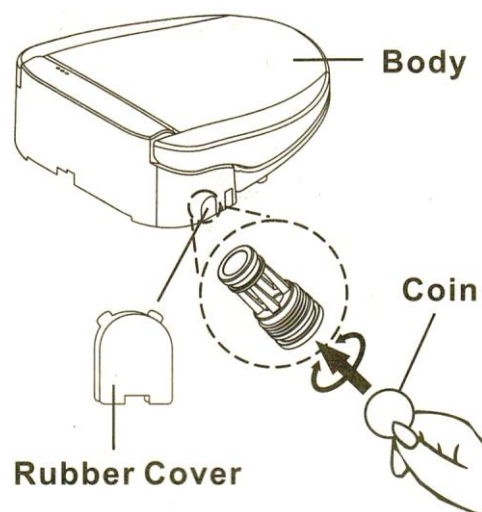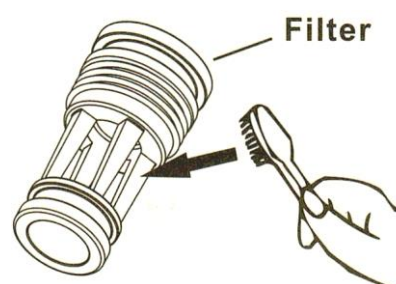

4. Återanslut vatten och elanslutningen.


## Vattentömning av Jasmin Care

Om du inte ska använda din bidé på en längre period ska den tömmas på vatten enligt nedanstående instruktion.

### Ta bort vatten och elanslutning

Montera bort vattentillförsel, tryck på "utlösarknappen" på höger sida av bidén och håll knappen intryckt medan sitsen försiktigt dras ur monteringskenan.

Lossa och öppna dräneringslocket bak på Bidéns undersida med ett passande mynt och låt allt vatten rinna ut. Skruva därefter tillbaka dräneringslocket och skjut därefter tillbaka bidén i monteringskenan. Återanslut sen vatten och elanslutningen. Jasmin är nu redo för att användas igen.

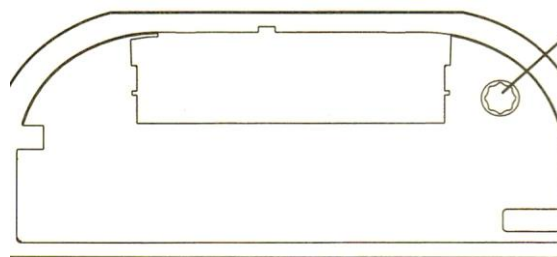

## Innan du kontaktar service

<b>Problem</b>	<b>Orsak</b>	<b>Lösning</b>
Vattentrycket är lågt	Inställning på fjärrkontrollen har för lågt tryck	Ändra inställningen som visas på sidan 11
Duscharmen kommer inte fram	Det sitter smuts i duscharmen  Du sitter för långt fram på sitsen.	Rengör duscharm enligt instruktion sidan 13  Sätt dig längre bak på sitsen
Duscharmen kommer bara ut halvvägs	Duscharmen är smutsig	Rengör duscharm enligt instruktion sidan 13
Duscharmen kommer inte ut eller avslutar duschning innan programmet är färdigt	Du sitter för långt fram på sitsen. Sensorn känner inte av att du sitter på sitsen	Sätt dig ordentligt och tillräckligt långt bak på sitsen så att sensorn aktiveras.
Duschningen avbryts	Du sitter för långt fram på sitsen	Starta om programmet <hr/> Dra ur elkontakten och vänta 15 sekunder innan du ansluter igen.
Sitsens temperatur är för låg	Har inte hunnit värmas upp, vänta.  Felaktig inställning på sitsvärm	Låt sitstemperaturen stå på tempererad. Kontrollera inställningen på fjärrkontrollen
Vattentemperaturen är för låg	Har inte haft tillräcklig tid för uppvärmning (3-4 min )  Felaktig inställning på fjärrkontrollen.	Förinställ vattentemperaturen på fjärrkontrollen. <hr/> Gör en liten paus så att vattnet hinner bli varmt igen



Problem	Orsak	Lösning
Fjärrkontrollen fungerar inte	Batterinivå för låg(displayen visar när de ska bytas.) Fjärrkontrollen är för långt från sitsen	Byt batteri  Placera fjärrkontrollen närmare sitsen.

Om det fortfarande är problem med din bidé efter att ha följt ovanstående instruktioner, ring Top Hygien tel: 031-94 35 26 eller maila [info@tophygien.se](mailto:info@tophygien.se) för konsultation.


**Observera:** Bidén är utrustad med en sittvakt och fungerar endast när denna är aktiverad. Detta för att undvika att sitsen kan spola utan att någon sitter på den. Sitsens högra sida (när du står framför toaletten) ska vara nedtryckt, för att bidén skall fungera.

## Tekniska specifikationer

<b>Model nr.</b>	<b>Jasmin Care (jhc – 511/512 )</b>
SSpänning	230 V
Nätfrekvens	50 – 60 Hz
Ledningens längd	1,5 meter
Kapslingsklass	IPX4
Varmvattentank	0,9 L
Vattentemperatur	Justeras i 4 lägen: Rumtemperatur/ 35°/37,5°/40°
Säkerhetssanordning	Termisk brytare, flödesutrustning med stoppventil och vacumbrytare
Vattenflöde tvättmunstycken	Justerbar i 4 läge: Ca. 1,2 l / min
Sitsvärme	Justerbar i 4 läge: Rumtemperatur/35°/37,5°/40°
Effektförbrukning	60 W
Säkerhetsanordning	Indbyggd termisk brytare
Vattenförsörjningstryck	1 – 10 bar
Säkerhetsanordningar	Termisk brytare, sittvakt
Netto vikt	3,6 kg
Max brukarvikt	125 kg/jhc-511    150 kg/jhc-512

## Mått på modell Jasmin Care

Bidetsæde	JHC-511	JHC-512
A	46 cm	49 cm
B	43 cm	46 cm
C	14-17 cm	
D	41 cm	

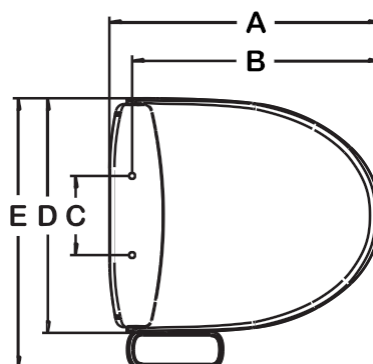

# Monteringsvägledning

Jasmin Care skall vara monterad så att det inte finns risk att den översköljs med vatten. Bidéns placering skall vara i våtzon 2 eller 3. Vid placering i våtzon 2 skall snabbkoppling användas (Extra tillbehör som kan köpas av Top Hygien AB Telefon 031-94 35 26).

1) Demontera den befintliga toalettsitsen



2) Fäst monteringskonsolen med avsedda skruvar, brickor och vingmutter. Kontrollera att konsolen är centrerad och att muttrarna är ordentligt dragna.

3) Justera **click on**-skenan med de 2 förmonterade stjärnskruvarna så att avståndet från bakkant på skenan till framkant på cisternen blir 2 mm. Dra åt dom två stjärnskruvarna.



4) Montera bidesitsen försiktigt på **click on**- skenan. Tryck sedan sitsen försiktigt bakåt mot cisternen tills ett "klick" hörs.



5) Kontrollera att sitsen sitter ordentligt fast samt att knappen för att lossa sitsen från **click on**- skenan är i neutralt läge. Se bild.



6) Stäng av vattentillförseln vid matningen.




7) Lossa ventilen från toalettstolen och montera medföljande T-koppling/stycke på toalettens vattentillförsel och montera därefter avstängningsventilen under T-kopplingen/stycket. Efterdra alla anslutningar.



### **OBS! Anslut alltid vatten före ström**

8) Montera vattenslangen på bidésitsens vattenanslutning, som sitter på vänster sida. Öppna därefter vattentillförseln via matningen och kontrollera att installationen är tät.

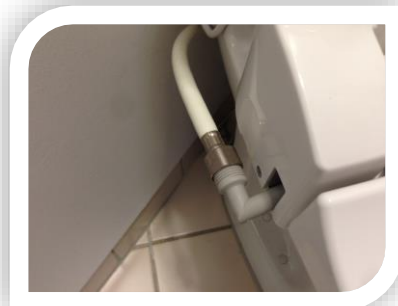

9) Montera fjärrkontrollen på lämplig plats. Använd medföljande beslag.



10) Sätt i stickkontakten i ett jordat 230V uttag. Bidén ska alltid vara anslutet till godkänd jordfelsbrytare.



11) Nu fylls vattentanken automatiskt med vatten. Ställ in önskade inställningar på fjärrkontrollen och din Jasmin Care är färdig att användas.



**OBSERVERA:** Om bidésitsen blinkar och startar – så är strömmen påslagen före vattentillförseln. Åtgärda detta genom att dra ur stickkontakten/bryt strömmen och vänta några sekunder. Kontrollera att vattentillförseln är påslagen och anslut därefter strömmen igen.

**OBSERVERA:** Bidésitsen fungerar endast när sittvakten är aktiverad. Sittvakten aktiveras genom att antingen sitta på ringen eller att sittringen trycks ned i bakre högra sidan (när du står framför toaletten).