

## Bidéra Lyft Flexible

Produktblad

På [www.vastiacare.se](http://www.vastiacare.se) kan du ladda ned dokumentation så att du garanterat har den senaste versionen.

Modell: Bidéra Lyft Flexible  
Version: 2020-1

### Avsedd användning

Bidéra Lyft Flexible underlättar för den som har svårt att resa och sätta sig vid toalettbesök. Med ett enkelt knapptryck höjs och sänks sitthöjden till önskad nivå. Lyften monteras direkt på WC-stolen och behöver varken fästas i väggen eller stödja mot golvet. Bidéra Lyft Flexible är avsedd för montering på befintlig golvmonterad skruvat toalettporcelain. Lyften går även att montera på vissa vägghängda toalettstolar under förutsättning att toalettstolen och dess installation är dimensionerad för lyftens angivna brukarvikt, samt dess egenvikt. Bidéra Lyft Flexible är endast avsedd som hjälp vid toalettbesök i inomhusmiljö. Produkten får inte användas för andra ändamål.



**Bidéra Lyft Fleible**

REF 74106      SN 2020-008

 (01)7350081270001  
(21) 2020-008  
(240) 74106

 2020

   MAX 150   

 Top Hygien Nordic AB  
Bäckvägen 26  
SE-463 33 Lilla Edet, Sweden

 Top Hygien

L74106-01

## Tekniska data

**Maximal brukarvikt:** 150 kg

**Vikt:** 35 kg

**Maxhöjd från porslinskant till ovkant sittplatta:** 275 mm

**Manöverenhet:** Inspänning: 230 V ~ 50 Hz Manöverspänning: 24 V DC

**Kapslingsklass elektronik:** IP 66

**Mått:**

**Total bredd:** 600 mm

**Avstånd mellan armstöd:** 505 mm

**Material:** Stål, plast, aluminium, gummi

## Tillbehör

### **Batteri**

Modellbeteckning batteri TBB7

Kapacitet 2.9Ah

Inkommande spänning 29~45V DC

Utgående spänning 24V DC, 2.9A

IP-klassning: IP54


### **Batteriladdare**

Modellbeteckning laddare TBC2

#### Batteri

Bidéra Top Lyft Flexible har ett bly-syra batteri på 24V med 2,9 Ah. Batteriet har en förväntad livslängd på ca 300 laddningscykler. Under förutsättning att man använder det enligt Batterier

För att optimera batteriets livslängd och prestanda ska batteriet laddas i 24 h var 3.e månad.rekommenderad anvisning.

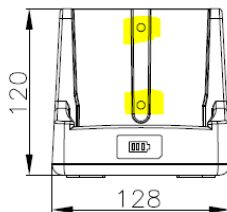

## Batteriladdare

Modellbeteckning laddare TBC2

Laddstället kan stå fritt på ex ett bord alternativt skruvas upp på vägg (med skruv via de två hålen i mitten av stället).



Batteriladdare: 28VDC

Art nr: TBC2-2022-004 med EU kontakt och TBC2-2022-005 med UK kontakt.

SP-2022-046 laddstället som laddaren kopplas mot och som batterit dockas i vid laddning.

### **Top bidéra Automatic – Standard och XL.**

#### Produktbeskrivning

Bidéra Automatic är en automatisk bidétillsats med dusch och torkfunktion som monteras på befintligt porslin/toalettstol. Bidéra Automatic kan på ett enkelt sätt programmeras så att alla kan använda den, oavsett förutsättningar. Bidéra Automatic är extra lätt att sköta och lätt att hålla ren! Den spoljar rent och torkar torrt helt automatiskt. Ett lätt tryck på touchkontrollen startar dusch- och torkningsprogrammet med marknadens effektivaste tork. Balansen mellan den främre och bakre duschstrilen kan ställas in så att den duschar där den gör bäst nytta. Tack vare en smart funktion i sittningen, startar inte programmet om inte någon sitter på ringen Bidéra Automatic passar de vanligaste förekommande WC stolarna i Sverige. Installationen förutsätter tillgång till varmt och kallt vatten samt 220 volt. Bidéra Automatic är fabriksinställd med lämpliga inställningar, men dessa kan givetvis justeras. Läs mer på [www.vastiacare.se](http://www.vastiacare.se) eller kontakta oss så skickar vi mer information.



Bild: Bidéra automatic standard.(toalettporslin ingår ej)

### Care Bidets – Jasmin Care Standard och XL

#### Produktbeskrivning

En helautomatisk bidésits med effektiv tvätt och torkfunktion. Enkel att använda, endast ett knapptryck och du kan välja mellan två standardprogram. Läs mer på [www.vastiacare.se](http://www.vastiacare.se) eller kontakta oss så skickar vi mer information.



Bild: Care Bidets – Jasmin Care standard

### Top Hygien Nordic AB

Bäckvägen 26

463 33 Lilla Edet

Telfonväxel: 031-94 35 26

[www.vastiacare.se](http://www.vastiacare.se)

#### 2020 Top Hygien Nordic AB

Innehållet får inte ges ut på nytt, mångfaldigas eller förändras helt eller delvis utan föregående skriftliga tillstånd från Top Hygien Nordic AB. Alla rättigheter är reserverade för Top Hygien Nordic AB. Bidéra Lyft Flexibel