

Bidéra Lyft Flexible

Rekonditionering

Inledning

Den här manualen innehåller viktig information om montering, justering, underhåll och rekonditionering av produkten.




Montering, justering, underhåll och rekonditionering av produkten får endast utföras av person med tekniskt kunnande och expertis inom montering. Läs noga och följ säkerhetsinstruktionerna för att försäkra dig om att du hanterar produkten på ett säkert sätt.

Allmänt





Rekonditioneringsmanual avser:





Modell: Bidera Lyft Flexible

Version: 2020-1


	<p>Varning! Denna symbol indikerar särskilt viktig säkerhetsinformation. Följ dessa anvisningar noga.</p>
	<p>Försiktighet! Anger en riskfylld situation som kan leda till lättare skada om den inte undviks.</p>
	<p>Viktigt! Anger en riskfylld situation som kan leda till produktskada om den inte undviks.</p>
	<p>Tips och rekommendation!</p>

Etiketter och symboler på produkten

	<p>Tillverkarens adress</p>
	<p>Tillverkningsdatum</p>
	<p>Brukarens maxvikt</p>
	<p>Visar överensstämmelse med Rådets direktiv 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE). Symbolen betyder att kasserad elektrisk och elektronisk utrustning</p>

	inte får kastas som hushållssopor utan måste lämnas till separat återvinning.
	Produkten är CE-märkt i enlighet med den medicintekniska förordningen 2017/745 klass 1.
	Klass II-utrustning
	Läs medföljande bruksanvisning
	Patientanslutna delar Typ B.

Överensstämmelse

	Produkten är CE-märkt i enlighet med den medicintekniska förordningen 2017/745 klass 1. Lansering för produkten anges i CE-försäkran om överensstämmelse. Vi arbetar i enlighet med följande standarder SS-EN 12182:2012. SS-EN 60601-1. SS-EN 60601-1-2
---	--

**VARNING!**

Risk för person- eller produktskador

- Läs igenom manualen och ev bruksanvisningar innan du hanterar produkten.
- Procedurerna i denna manual ska endast utföras av en kvalificerad tekniker.
- Kontrollera att alla muttrar har dragits åt ordentligt och att alla delar fungerar korrekt vid varje montering.
- Vid frågor kontakta Top Hygien eller kvalificerad tekniker.

**VARNING!**

Risk för kontaminering

Rengör och desinficera produkten noggrant före service

**VARNING!**

Risk för person- eller produktskador

Använd endast originaldelar. Reservdelar kan beställas av Top Hygien. www.vastiacare.se

**VIKTIGT!**

Mer information om produkten finns i bruksanvisningen.

Ansvarsbegränsning

Top Hygien ansvarar inte för skador som uppkommer till följd av:

- Felaktig användning
- Normalt Slitage
- Att bruksanvisning inte följs
- Felaktig installation eller montering som utförts av köparen eller tredje part
- Åverkan på produkten
- Användning av felaktiga delar eller tillbehör


Vi rekommenderar att endast komponenter och reservdelar för Bidéra Lyft Flexible används. Försäkrans om överensstämmelse är inte giltig och Top Hygien tar inget garantiansvar om modifieringar har utförts på produkten. Top Hygien tar inget ansvar för tillbud, olyckor eller försämring av produktens prestanda som kan inträffa om komponenter från andra tillverkare används. Om ej godkända tillbehör används kan inte Top Hygien längre garantera att säkerhetsbestämmelserna uppfylls.


Inspektionschecklista

Allmän inspektion

FRÅGA	😊	☹️
Är produkten i gott skick?		
Är produkten komplett?		
Är produkten fri från skador och svagheter av alla slag?		
Fungerar produkten som den ska under nominell belastning?		
Fungerar produkten helt och hållet i enlighet med bruksanvisningen?		
Är alla eventuella fel som hittats åtgärdade?		
Har felaktiga komponenter bytts ut till originaldelar?		
Sitter alla skruvar/bultar fast ordentligt och är produkten ordentligt monterad?		
Är produkten tekniskt och funktionsmässigt säker?		
Har produkten rengjorts och desinficerats?		
Är serienummeretiketten lätt att läsa och sitter den fast ordentligt på produkten?		
Har produkten levererats med den senaste versionen av bruksanvisningen?		

Rekonditionering

	<p>WARNING! Risk för person- eller produktskador. Se till att kontakt är utdragen vid skötsel och rengöring.</p>
---	---

	<p>WARNING! Risk för person- eller produktskador. Produktens prestanda kan påverkas av skadade eller slitna delar. Produkten ska kontrolleras varje gång den används. Använd inte produkten om du ser skador på den eller misstänker att någon del av produkten inte är säker. Kontakta din Top Hygien leverantör omgående och se till att produkten inte används förrän reparation har utförts.</p>
---	---


Ta av sidkåporna

- Skruva av sidkåporna



Skruva av kupolmuttrarna och lossa försiktigt kåpan. Var noga när du sätter tillbaka kupolmuttrarna så dom sitter ordentligt och inte lossnar.

Kontrollera alla slitdelar, se rödmarkerade.

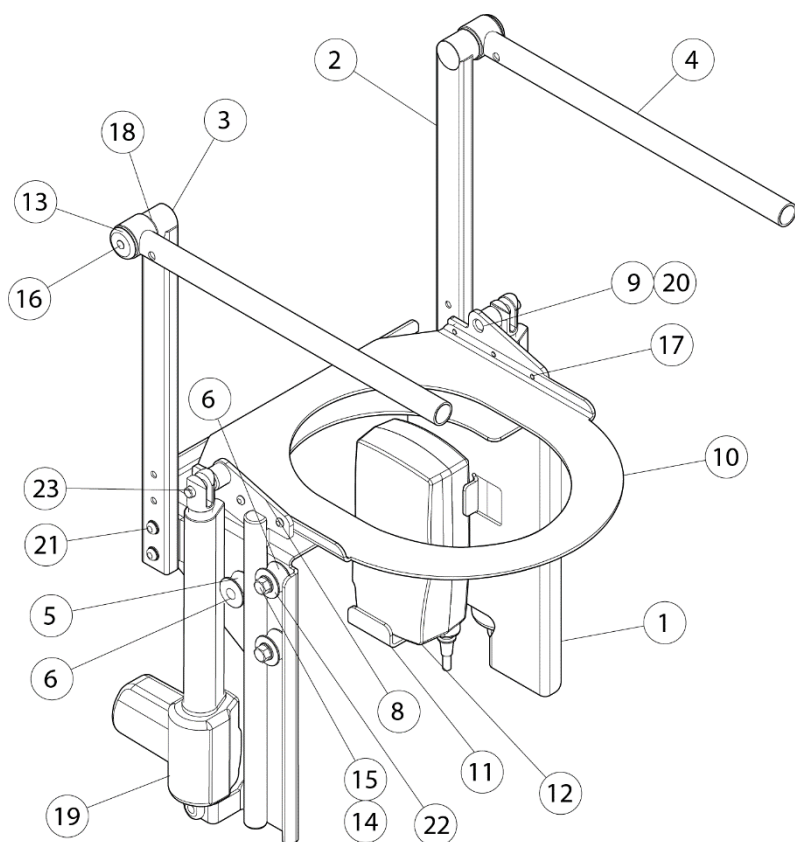

Nummer	Komponent
1	Chassi
2	Handtagsfäste, Vänster
3	Handtagsfäste, Höger
4	Handtag
5	styrhjul
6	Hjulbussning
7	Styrpinne
8	Ställonsfäste, höger
9	Ställonsfäste, vänster
10	Sits
11	Fäste styrbox
12	Styrbox
13	Bricka
14	Skruv, MC6S
15	Mutter M6M
16	Skruv MC6S
17	Skruv K6S
18	Bussning
19	Ställdon
20	Skruv MC6S
21	Skruv K6S
22	Bricka BRB
23	Saxpinne

Anvisningar för rengöring – VIKTIGT!

- Stäng av enheten och koppla ifrån elnätet.
- Vid rengöring av elektroniska komponenter bör du beakta deras skyddsklass gällande vatteninträning.
- Se till att inget vatten stänker på kontakten eller vägguttaget.
- Hantera aldrig eluttag med blöta händer
- Lyftens får inte sköljas i rinnande vatten.
- Använd inte lösningsmedel eller starka vätskor eftersom det kan skada lyftens ytor
- För desinfektion vid behov: använd ytdesinficeringsmedel för hemmabruk
- Undvik slipande rengöringsmedel. Använd ytdesinficeringsmedel för hemmabruk för att ta bort fett och smuts på kontakten och handkontrollen.

Metod

Torka av produkten med en våt trasa eller en mjuk borste och lämpligt pH-neutralt rengöringsmedel.

Max. temperatur: 40 °C.

Torkning: Torka av med en mjuk trasa

Reparation

Byta armstödet Insexnyckel (4 mm)



1. Skruva ur dom 2 skruvarna som är markerade på bilden med den medföljande insexnyckeln.
2. Ta bort armstödsfästet med armstödet.
3. Sätt i skruvarna i det nya armstödsfästet och för in dem genom hålen i ryggstödsramen.
4. Fäst skruvarna i muttrarna och dra åt dem.
5. Utbytesproceduren är likadan för det högra och vänstra armstödet.

Återställning/reset Ställdon

RESET Ställdon – Kör lyften till bottenläge, släpp knappen, håll inne nedåtknappen och vänta på att det klickar ett ljud från kontrollboxen två gånger. Upprepa vid behov.

Top Hygien Nordic AB

Bäckvägen 26

463 33 Lilla Edet

Telfonväxel: 031-94 35 26

www.vastiacare.se

2020 Top Hygien Nordic AB

Innehållet får inte ges ut på nytt, mångfaldigas eller förändras helt eller delvis utan föregående skriftliga tillstånd från Top Hygien Nordic AB. Alla rättigheter är reserverade för Top Hygien Nordic AB. Bidéra Lyft Flexibel